

Anogenitaalpiirkonna kaaepetroovi võtmine meespatsientidel.



Järgige neid samme, et võtta igapäevaselt anogenitaalne kaaepetroov. Samm-sammulise video vaatamiseks skannige kood.

Olulised meeldetuletused enne kaaepetroovi võtmist



Leidke kaaepetroovide võtmiseks privaatne ruum või vannituba.



Võtke kaaepetroov enne või vähemalt 1 tund pärast vannis või duši all käimist.



Peske ja kuivatage hoolikalt käed.




Ärge puudutage tampooni otsikut.



Täitke täielikult viaali etikett.


01

Hõõrge tampooni peenise otsast kuni põhjani ja kogu ulatuses, kattes kogu piirkonna.

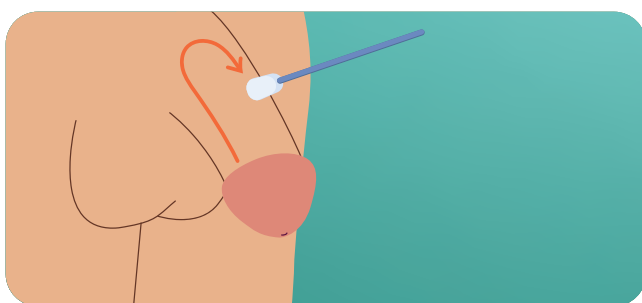


02

Kui olete ümberlõikamata, tõmmake ka eesnahk tagasi ja hõõrge tampooniga üle eesnaha niiske pinna ja peenisepea. Kui olete ümberlõigatud, jätkake järgmise sammuga.

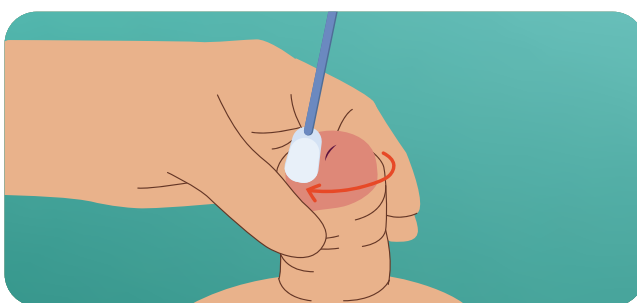


03

Hõõrge munandikoti ja päraku vahelist nahka ning päraku ümbrusesse jäävat piirkonda. Hõõrge tampooni ringjate liigutustega üle päarakupiirkonna, kattes umbes 4 cm (1,5 tolli) raadiuses päraku ümbruse.

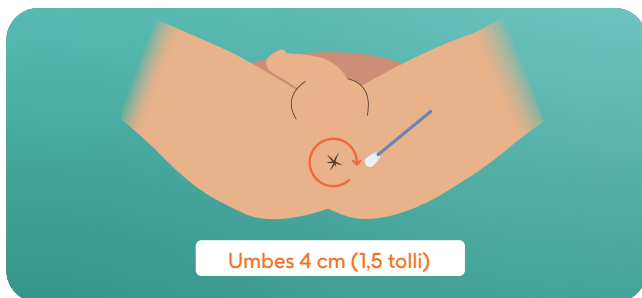

04

Asetage tampoon viaali. Tõmmake tampooni veidi ülespoole ja painutage või lõigake selle vars. Veenduge, et vars oleks piisavalt lühike ega segaks korki sulgemist. Olge ettevaatlik, et viaali sisu välja ei lekiks. Lekke vältimiseks keerake viaali kork tihedalt peale.

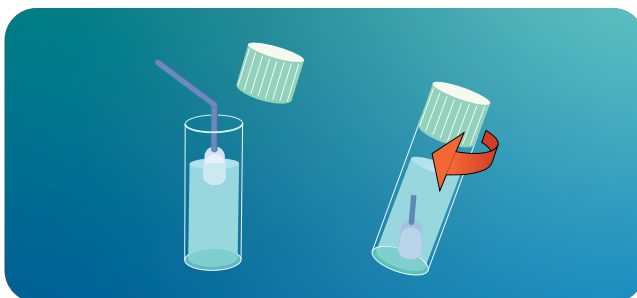

Olulised meeldetuletused pärast kaaepetroovi võtmist



Kleepige etikett ümber viaali. Veenduge, et kogu teave oleks nähtav.



Peske ja kuivatage taas hoolikalt käed.



Täitke vastavalt juhistele oma ePäevik.

Kui Teil on küsimusi, pidage nõu oma uuringuarsti või -õega.